

Gebrauchsanweisung

GERUT® Umbettungstuch



Für die sichere Anwendung dieses Produkts lesen und beachten Sie bitte, vor dem Erstgebrauch, diese Gebrauchsanweisung.

Zweckbestimmung

Das GERUT® Umbettungstuch ist ausschließlich für die schonende Umlagerung eines Patienten von z.B. einer Patiententrage / Helikoptertrage in ein Krankenbett oder auf einen Röntgentisch, oder umgekehrt, vorgesehen.

Bestimmungsgemäße Anwendung

Vom Einsatz vor Ort bis zur Versorgung im Klinikbereich ist das GERUT® Umbettungstuch eine sichere und zuverlässige Unterlage zum Schutz der Trage. Bei dem GERUT® Umbettungstuch handelt es sich um ein Medizinprodukt, das nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem Fachpersonal angewendet werden darf. Für die Durchführung der Einweisung ist der Betreiber und der Anwender des Medizinprodukts verantwortlich. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

- Offene Wunden oder nicht intakte Hautareale nach den aktuellen Empfehlungen zur aseptischen Wundbehandlung versorgen und steril abdecken
- Überprüfung der Unversehrtheit des Produkts vor jeder Anwendung



Das GERUT® Umbettungstuch ist kein Tragetuch nach DIN EN 1865-1

Vor der Anwendung die Verpackungs-Hülle entfernen und das GERUT® Umbettungstuch auseinanderfalten. Zum Umbetten das GERUT® Umbettungstuch faltenfrei unter den Patienten positionieren. Durch gleichmäßige Nutzung der 12 Grifflöcher den Patienten anheben und umbetten.



Auf gleichmäßige Belegung der Griffe achten. Das Gewicht des Patienten muss auf dem GERUT® Umbettungstuch gleichmäßig verteilt sein



Beachten Sie die für Sie geltenden Arbeitsschutzrichtlinien bei der Anwendung des GERUT® Umbettungstuches

Das GERUT® Umbettungstuch ist zur mehrfachen Anwendung nach sachgerechter Wiederaufbereitung vorgesehen. Durch die PE-Oberflächen-Beschichtung ist es besonders hygienisch und Flüssigkeits-

undurchlässig, wodurch Tragen und Unterlagen geschont werden. Es kann in einem Temperaturbereich von -20°C - +70°C angewendet werden.

Vorgesehene Patientengruppe

- Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Anwendung bei Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen

Die Anwendung des GERUT® Umbettungstuches bei diesen Patientengruppen bedarf keiner besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Bei der spezifischen Behandlung sind die Therapieempfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften zu beachten. Dies kann insbesondere die Lagerung von schwangeren Frauen betreffen.

Anwendungsbeschränkungen / Kontraindikationen

Das Produkt ist für die Anwendung bei einem Patienten bis maximal 110 kg Körpergewicht vorgesehen.

Unerwünschte Nebenwirkungen bei Anwendung des Medizinprodukts

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des GERUT® Umbettungstuches sind keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten.



Sicherheitshinweis

Das Produkt darf nur in ordnungsgemäßem und unbeschädigtem Zustand angewendet werden

Maßnahmen bei Fehlfunktionen oder Leistungsveränderungen des Produkts

Sollte das GERUT® Umbettungstuch Beschädigungen aufweisen, so ist dieses gegen ein intaktes Umbettungstuch auszutauschen.

Medizinprodukte, die gemeinsam mit dem GERUT® Umbettungstuch verwendet werden können

Das GERUT® Umbettungstuch kann bei bestimmungsgemäßer Anwendung mit allen zum Patiententransport oder Patientenlagerung zugelassenen Medizinprodukten kombiniert werden. Als Beispiele hierfür gelten: Krankentrage, Vakuummatratze, Schaufeltrage, Tragetuch, Spineboard/Langes Wirbelsäulenbrett, Tragestuhl oder Helikoptertrage, Krankenbett, Röntgentisch, Ambulanzliege usw. (Liste nicht abschließend – bei fraglicher Kombinationsmöglichkeit bitte Kontakt mit dem Hersteller unter mpsicherheit@werkverein-ge.de aufnehmen)

Überprüfung des sicheren und betriebsbereiten Zustandes des Medizinprodukts

Vor Anwendung des GERUT® Umbettungstuches muss dieses durch eine Sichtkontrolle auf einen einwandfreien Zustand hin überprüft werden. Dies gilt insbesondere für sachgerecht wiederaufbereitete GERUT® Umbettungstücher



Sicherheitshinweis

Als Maßnahme bei vermuteter oder offensichtlicher Beschädigung eines GERUT® Umbettungstuches darf dieses Medizinprodukt nicht angewendet werden und sollte umgehend gegen ein neues, original verpacktes GERUT® Umbettungstuch ausgetauscht werden.

Hinweise zu eventuellen wechselseitigen Störungen bei Untersuchungen und Behandlungen

Das GERUT® Umbettungstuch ist durchlässig für Röntgenstrahlung und nicht magnetisch und kann daher auch während der Durchführung einer Röntgenuntersuchung / Computertomographie / Magnetresonanztomographie unter dem Patienten belassen werden. Bei der Durchführung von Röntgenuntersuchungen, Computertomographien oder Magnetresonanztomographien kann es durch Interaktionen zu einer Einschränkung der Aussagekraft der Untersuchungen und Artefakten kommen.

Wiederaufbereitung - Reinigung und Pflege / Desinfektion

Das GERUT® Umbettungstuch kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung der PE beschichteten Oberfläche führen kann, ist zu vermeiden. Desinfektion, in Form einer Oberflächen-Wischdesinfektion, ist mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln der Substanzklassen der Alkohole, Aldehyde und Amine möglich. Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen, was wiederum die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Produkts beeinflussen kann. Keine Lösungsmittel verwenden!

Bei Fragen zur Anwendbarkeit spezieller Desinfektionsmittel kontaktieren Sie bitte den Hersteller unter mpsicherheit@werkverein-ge.de.

Wiederverwendbarkeit des GERUT® Umbettungstuch

Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden.



Sicherheitshinweis

Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produkts überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Technische Angaben

Länge x Breite:	185 x 76 cm
Maße verpackt :	22 x 20 x 4 cm
Gewicht :	460 g
Maximale Belastbarkeit :	110 kg

Das Produkt ist latexfrei



Angaben zur sachgerechten Entsorgung des Medizinprodukts

Die Verpackungs-Hülle kann, nach den lokalen Vorgaben, im Kunststoffabfall entsorgt werden. Nach einer ordnungsgemäß durchgeführten Desinfektion kann das gebrauchte Produkt im Restmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorgaben zur Entsorgung von Restmüll.

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernimmt der Hersteller die Gewährleistung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.



Sicherheitshinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und / oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



Hersteller:

Gelsenkirchener Werkstätten
für angepasste Arbeit gmbH
BrauKämperstrasse 100
D - 45899 Gelsenkirchen
Fon: +49 (0) 209 / 95896-0
Fax: +49 (0) 209 / 95896-88
eMail: sales@rettungstuch.com
Internet: www.rettungstuch.com



Dieses Produkt ist konform mit den Grundlegenden Anforderungen des Anhang I der EG-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte / MDR

Stand 01.10.2024

Technische Änderungen vorbehalten

Die Inhalte dieser Gebrauchsanweisung sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung, auch nur auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung.